

DENFLY®

**DISINFETTANTI ED IGIENIZZANTI
AD USO PROFESSIONALE**

STUDIO ODONTOIATRICO

SARATECH
DENTISTRY & TECHNOLOGY



SANASoap

SANASoap è un sapone mani detergente igienizzante a base di **acido lattico**. L'acido lattico è noto come sistema naturale di **controllo della colonizzazione batterica** della pelle; è di **origine vegetale, completamente biodegradabile e ad alta tollerabilità cutanea**. Il suo **pH acido protegge la cute dalle aggressioni esterne** e grazie alla sua azione condizionante lascia le mani morbide. SANASoap con il suo potere detergente allontana fisicamente la flora microbica transitoria della cute ed è adatto al lavaggio delle mani del personale medico e paramedico, di ambulatori medico dentistici e per tutte quelle attività lavorative che richiedono un **alto livello di igiene delle mani**. Uso professionale. Per ogni situazione quotidiana dove è necessaria e consigliata la pulizia profonda delle mani.

Modalità d'uso: versare una piccola quantità (5ml) di sapone nel cavo della mano frizionare per almeno 1 minuto e risciacquare. Se necessario ripetere l'operazione anche 10 volte al giorno.



SANACHol

SANACHol è un disinfettante detergente a base di **alcool isopropilico ed o-fenilfenolo**, tale associazione permette di ottenere un'ottima **attività disinfettante ad ampio spettro: fungicida, battericida, micobattericida e su virus con mantello**. Possiede, inoltre, **ottime proprietà detergenti e dissolventi su residui organici**, come sangue e liquidi biologici. Indicazioni: prodotto indicato per la **disinfezione e decontaminazione di dispositivi medici non invasivi** presenti in sala operatoria.

Modalità d'impiego: nebulizzare con apposito erogatore spray direttamente sulle superfici o presidi da trattare. *Tempi di contatto:* in condizioni di pulito battericida in 1 minuto e attivo su virus con mantello in 5 minuti. In condizioni di sporco estremo attivo su funghi e batteri in 5 minuti, attivo su virus con mantello (HIV, HBV, HCV) in 10 minuti, attivo su micobatteri (TBC) in 15 minuti. Successivamente asciugare con panno pulito o carta.



SANAFLOW

SANAFLOW concentrato è una **soluzione tuberculicida, battericida, fungicida e attiva su virus con mantello, specifica per circuiti di aspirazione chirurgica-odontoiatrica ed ospedaliera**. La presenza dei **sali d'ammonio quaternario**, garantisce un'eccellente attività **biocida** della soluzione in presenza di materiale organico come sangue, saliva, essudati organici etc. *Indicazioni:* SANAFLOW è indicato per la detergenza, decontaminazione e disinfezione dei circuiti di aspirazione chirurgica.

Modalità d'impiego: Agitare prima di ogni uso. Diluire in acqua adoperando l'apposito dosatore integrato. Inserire i tubi d'aspirazione direttamente nella vasca dove è stata preparata la soluzione. Attivare il flusso del circuito e lasciare agire per il tempo di contatto stabilito. *Diluizione e tempi di contatto:* per detergere i circuiti diluire all'1,0% (10 ml in 1 litro di acqua) e lasciare agire per 10 minuti. Per un'attività decontaminante diluire al 2% (20 ml in 1 litro di acqua) e lasciare fluire per un tempo di contatto di 15 minuti, quindi risciacquare con acqua e lasciare asciugare. La soluzione diluita resta attiva per 48 ore.

SANASol-D

SANASol-D ferri chirurgici è una **soluzione concentrata ad attività multipla: detergente, decontaminante e disinfettante ad ampio spettro d'azione (livello intermedio) tuberculocida, virucida (virus con mantello)**. La sua particolare formulazione, una **miscela plurienzimatica ad elevata attività proteo-lipo-litica e BIOFILM DISGREGANTE**, sinergicamente agli altri componenti della soluzione, consente di ottenere un **eccellente risultato disinfettante e pulente** anche su strumenti notevolmente carichi di residui organici come grumi di sangue, frammenti ossei e tissutali. *Indicazioni:* detersione, decontaminazione e disinfezione dello strumentario chirurgico critico, semi-critico, dispositivi medici diagnostici ed operatori in genere: bisturi, pinze, sonde, forbici, frese, porta aghi, divaricatori, cateteri, endoscopi etc.

Modalità d'impiego: SANASol-D può essere utilizzato in vasca libera, vasca ad ultrasuoni e lavastrumenti automatiche immergendo gli strumenti alla diluizione e tempo di contatto stabilito. Risciacquare ed asciugare prima della successiva fase di sterilizzazione. *Diluizione e tempi di contatto:* si usa diluito in acqua utilizzando l'apposita camera di dosaggio integrata nel acone. Diluire al 1% (10 ml per ogni litro d'acqua); per un'attività battericida immergere gli strumenti per 10 minuti. Per un'attività, in condizioni di sporco, battericida e virucida (su virus con mantello) immergere gli strumenti per 15 minuti.

**DISINFETTANTI PER
FERRI CHIRURGICI**



SANASol

SANASol è una soluzione pronta ad **attività multipla: detergente, decontaminante e disinfettante ad ampio spettro d'azione (livello intermedio) tuberculicida, virucida (virus con mantello)**. La sua particolare formulazione contenente α -LIP, miscela **plurienzimatica ad elevata attività proteolitica e BIOFILM DISGREGANTE**, sinergicamente agli altri componenti della soluzione, consente di ottenere un **eccellente risultato disinfettante e pulente** anche su strumenti notevolmente carichi di residui organici come grumi di sangue, frammenti ossei e tissutali. **Indicazioni:** detersione, decontaminazione e disinfezione dello strumentario chirurgico critico, semi-critico, dispositivi medici diagnostici ed operatori in genere: bisturi, pinze, sonde, forbici, frese, porta aghi, divaricatori, cateteri, endoscopi etc.

Modalità d'impiego: nebulizzare con apposito erogatore spray direttamente sulle superfici dei dispositivi da trattare. Può essere utilizzato in vasca libera immergendo gli strumenti alla diluizione e tempo di contatto stabilito. Risciacquare ed asciugare prima della successiva fase di sterilizzazione. Diluizione e tempi di contatto: per un'efficacia ottimale lasciare agire per 15 minuti.



SANACetic

SANACetic è una **polvere composta (acido peracetico derivato) idrosolubile, disinfettante di alto livello e virucida** per strumentario chirurgico odontoiatrico ed ospedaliero. Indicazioni: SANACetic è indicato per **la disinfezione di alto livello, con attività virucida, dello strumentario critico e semi-critico** (bisturi, pinze chirurgiche e per estrazioni, leve, sonde, specchietti, specilli, frese etc.)

Modalità d'impiego: SANACetic può essere utilizzato in vasca libera e vasca ad ultrasuoni immergendo gli strumenti alla diluizione e tempo di contatto stabilito. Risciacquare ed asciugare prima della successiva fase di sterilizzazione.

Diluizione e spettro d'azione: dosare la polvere in acqua utilizzando l'apposito misurino di dosaggio presente nel barattolo al 2% (20 g per ogni litro d'acqua). La soluzione è attiva dopo 15 minuti dalla preparazione, quindi immergere gli strumenti per un tempo di contatto di 10 minuti.





SANAMatic

SANAMatic è una **soluzione plurienzimatica concentrata detergente specifica per strumentario chirurgico e dispositivi medici** di ospedali, cliniche, case di cura, veterinari, odontoiatri e ambulatori medici. Particolarmente **efficace per la dissoluzione di materiale organico**: sangue, saliva, proteine, residui di tessuto biologico, frammenti ossei etc. Indicazioni: SANAMatic è indicato per il **lavaggio e detersione di attrezzature chirurgiche, dispositivi medici e strumentario chirurgico**.

Modalità d'impiego: è particolarmente indicato per l'utilizzo in vasca ultrasuoni. Può essere usato anche in vasca libera immergendo gli strumenti alla diluizione e tempo di contatto stabilito. Successivamente risciacquare e asciugare. *Diluizione e tempi di contatto:* si usa diluito tra 0,5% e 2% in acqua immergendo gli strumenti per 15 minuti per un'azione di detersione.



www.sanatech.eu
ordini.sanatech@gmail.com
+39 377 84 53 716